

Beschrijving van het product

Granudacyn® wondspoelvloeistof is een kant-en-klare wondspoelvloeistof voor het reinigen en spoelen van acute, chronische en verontreinigde wonden. Reiniging van wonden voorkomt wondinfectie. Bij reeds geïnfecteerde wonden kan aanvullende wondspoeling helpen om de microbiële belasting aanzienlijk te verminderen. Dit is het gevolg van het mechanische effect van de spoeling, waardoor de wondgenezing wordt bevorderd.

Inhoud: water, natriumchloride, onderchlorigzuur, natriumhypochloriet

Indicaties voor gebruik

Granudacyn® wondspoelvloeistof kan worden gebruikt voor de grondige reiniging van:

- alle chronische wonden van elke diepte, zoals: diabetische voetzweren, alle soorten beenzweren, doorligwonden
- alle acute wonden zoals snijwonden, beten, scheurwonden, barstwonden en schaafwonden
- operatiewonden (intraoperatief en postoperatief)
- wonden met blootligging van kraakbeen, pezen, ligamenten of bot
- eerste- en tweedegraads brandwonden
- bestralingszweren
- fistels en abscessen
- lichaamsholtes zoals de mond, neus en oren
- kritisch gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden
- wekdelenletsel

Granudacyn® wondspoelvloeistof kan worden gebruikt voor indruppeling bij wondbehandeling met vacuümtherapie (NPWT).

Voorzorgsmaatregel(en)

- Granudacyn® wondspoelvloeistof is niet geschikt voor systemisch gebruik, d.w.z. Granudacyn® wondspoelvloeistof mag niet worden toegediend via intraveneuze of intra-arteriële injecties of infusies.
- Mag niet worden gecombineerd met andere wondreinigingsproducten (zoals enzymatische wondreinigers).
- Niet mengen met andere producten of chemicaliën.
- Gebruik alleen onaangebroken en onbeschadigde verpakkingen.
- Gebruik Granudacyn® wondspoelvloeistof niet bij patiënten en/of gebruikers met bekende overgevoeligheid voor de materialen/bestanddelen van het product.
- Inname via de mond, hoewel onschadelijk, wordt evenwel niet geadviseerd.

Instructies voor gebruik

Granudacyn® wondspoelvloeistof hoeft niet weggespoeld of geneutraliseerd te worden. De wond moet grondig met Granudacyn® wondspoelvloeistof worden gespoeld. Om het reinigende effect te versterken, wordt aanbevolen om de oplossing 60 seconden in te laten trekken om eventuele korstjes te verweken.

Deze procedure kan meerdere keren per dag of bij elke verbandwisseling worden herhaald. De wond kan ook worden gereinigd met een gaasje dat in Granudacyn® wondspoelvloeistof is gedrenkt.

Wondverband met korsten kan gemakkelijk en zonder trauma met Granudacyn® wondspoelvloeistof worden losgehaald. Ter ondersteuning van de mechanische reiniging van de wond kan de aanbrengtijd van Granudacyn® wondspoelvloeistof tot 15 minuten worden verlengd om hardnekkige korsten te verwijderen.

Granudacyn® wondspoelvloeistof kan tot 60 dagen na opening worden gebruikt. De datum van eerste opening moet in de daarvoor bestemde ruimte op de fles worden gnoteerd.

Granudacyn® wondspoelvloeistof mag vóór gebruik tot 37°C worden opgewarmd.

Granudacyn® wondspoelvloeistof kan door leken onder toezicht van professionele zorgverleners worden gebruikt en is geschikt voor herhaald gebruik.

Gekwalificeerde professionele zorgverleners mogen Granudacyn® NPWT alleen gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing die door de fabrikant van het NPWT-systeem is geleverd.

Granudacyn® wondspoelvloeistof kan worden gebruikt met schuimverbanden van Mölnlycke Health Care: Mepilex, Mepilex Border en Mepilex Border Flex.

Bijzondere bewaar- en hanteringsvoorwaarden

Bewaar het product tussen 3 en 25°C.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Gooi het product weg overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften.

Overige informatie

Granudacyn® is een geregistreerd handelsmerk van Mölnlycke Health Care AB.

Elk ernstig incident dat voortvloeit uit het gebruik van Granudacyn® wondspoelvloeistof moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie in uw land.